

# Lainiere Santé™

Sustainable Face Mask

PARIS

## MASQUES 3 PLIS TRIPLE PLEATED MASKS



Washing net  
recommended



40°C  
-20°C  
Storage

### COMMENT PORTER LE MASQUE ? HOW TO WEAR THE MASK ?



#### FRANÇAIS

1. Une fois les mains lavées, prenez le masque, le bord rigide vers le haut.

2. Placez le masque sur votre visage et attachez-le par les élastiques derrière les oreilles. L'étiquette doit être portée à l'intérieur du masque.

3. Moulez le renfort rigide du haut du masque sur la racine du nez.

4. Abaissez le masque sous le menton.

#### ENGLISH

1. Once hands are washed, take the mask with the rigid edge up.

2. Place the mask on your face and attach it with the elastics behind the ears. The label must worn inside the mask.

3. Mold the rigid reinforcement from the top of the mask on the root of the nose.

4. Lower the mask under the chin.

# NOTICE D'UTILISATION

## MASQUE DE PROTECTION UNS2 - M3LH001

**Composition de la matière principale :** 82% Polyester - 18% Polyamide

**Explication sur la méthode de lavage :** Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque répond aux recommandations AFNOR de 5 lavages puisqu'ils peuvent être lavés et réutilisés jusqu'à 10 fois conformément aux tests effectués dans nos laboratoires. Repassage à une température de 120°C.

**Performances :** Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 Masque catégorie 2 « UNS 2 » = masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques. Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 70%. Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa.

**Précautions d'usage :** Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Tests au porter pendant 4 heures réalisés par nos soins. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; Lors du port du masque éviter de le toucher ou de le déplacer. Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ; Pour retirer le masque, L'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque) Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée (s'il n'est plus réutilisable) ; Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

**Entretien du masque :** Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac. Les masques non utilisés sont à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

**Contexte d'utilisation :** Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

**Domaine d'utilisation :** Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.



Étiquette portée à l'intérieur du masque